

Návod na použitie vložiek e.b.fusselastlic

Pred použitím si prosím pozorne prečítajte nasledujúce odporúčania:

Milí zákazníci!

Veľmi nás teší, že ste zvolili vložky e.b. fusselastlic.

Vaše vložky sa skladajú z dvoch častí:

1. pružnej vložky z nehrdzavejúcej ocele s vidlicovou štruktúrou a
2. odnímateľného masážneho vankúšika (sivý alebo bordový)

Vložky e.b. fusselastlic sú vyrobené v Nemecku a sú prispôbivé výlučne vašim chodidlám a vašej telesnej hmotnosti, aby odľahčenie Vašich chodidiel bolo čo najúčinnnejšie.

Pozorne si prečítajte prosím nasledovné pokyny a riadte sa nimi pre dosiahnutie požadovaného účinku, aby ste si mohli vaše nové vložky e.b. fusselastlic užívať čo najdlhšiu dobu.

Ako vložiť vložky e.b. fusselastlic do topánky?

Koniec vložky (časť bez vankúšika, kovová časť) musí byť v časti chodidla pod pätou, u pätej časti topánky (cca. 0,5cm od okraja), časť s masážnym vankúšom smeruje k prstom chodidiel. Vložka v obuvi sa v závislosti od obuvi môže pri chôdzi posunúť o 1-2 cm dopredu. Toto je ovplyvnené najmä tvarom vašej obuvi.



Ako rozlíšiť vložku pre pravú a ľavú nohu?

Vložka na pravú nohu majú na spodnej časti písmeno "R", zatiaľ čo pre ľavú nohu má písmeno "L".

Čísla na spodnej časti nesúvisia s veľkosťou topánok, sú určené len pre informáciu pre výrobcu.

Ako rozlíšiť hornú a dolnú časť masážneho vankúšika?

Vrchná časť vložky je k dispozícii v svetlej (sivej) alebo (tmavo) bordovej farbe. Spodná časť je bledohnedá.

Svetlý masážny vankúšik je plochejší, tmavý je viac odpružený.



Prečo existujú dve rôzne masážne vankúše?

Ľahko ich rozoznáte podľa farby.

- Svetlé masážne vankúše sa môžu používať počas aklimatizácie alebo nosiť v tesných topánkach.

- Tmavé masážne vankúše sa odporúčajú pre širokú obuv, najmä ak sú tlakové body na chodidle intenzívne zaťažované.

Výmena masážnych vankúšov je hračka

1.
uchopte masážny vankúšik uprostred (palec hore) a jemne stiahnite vankúšik z vložky



2. Pri nasádzaní uchopte vankúš uprostred, trochu zatlačte a natiahnite ho na vložku



Cítiteľná masáž, príjemné podoprenie

Po vložení vložky do topánky sa postavte a prenášajte váhu z jednej nohy na druhú. Budete cítiť mierny tlak v strednej časti chodidla. Tento mierny tlak je výsledkom používania vložky a v krátkom čase ho nahradí príjemný uvoľňujúci pocit, ako pri masáži.

Vaše chodidlá si rýchlo zvyknú na prirodzené podmienky.

Pri používaní vložiek môžu nastať spočiatku bolesti svalov alebo aj únava

Na uľahčenie tohto prechodného obdobia sa odporúča nosiť ich prvý deň len asi 1 hodinu a potom postupne každý deň tento čas predlžujte o 1 hodinu.

Po 1-1,5 týždni môžete nosiť vložky celý deň.

Po 3-4 týždňoch sa začnete cítiť lepšie.

Prečo je pružná vložka vyrobená z nehrdzavejúcej ocele?

Vynikajúca kvalita nehrdzavejúcej ocele jej dodáva jedinečné mechanické vlastnosti, aktívne „cvičí“ so svalstvom chodidiel.

Ich tenký tvar umožňuje použitie vložiek takmer v akomkoľvek type obuvi.

Zakrivený dizajn zaručuje flexibilitu, ktorá zabezpečuje trojbodovú podporu a masáž.

S ktorými časťami e.b. fusselastic pohybuje?

e.b. fusselastic pružne podporie, pohybuje a posilňuje šľachy, väzy a svalstvo, jemný vankúš masíruje, stimuluje prietok krvi, poskytuje stálu trojbodovú oporu, zmierňuje tlak na nohy a zabraňuje jednostrannému zaťaženiu.

e.b. fusselastic nie je tvrdá a pevná vložka, ale je pružným prostredníkom medzi chodidlom a tvrdou zemou, poskytuje nohe pružné, prirodzené a nevyhnutné podoprenie.

Kedy by ste nás mali kontaktovať so žiadosťou o pomoc?

Ak by vložka po 3-4 týždňoch používania stále neposkytovala príjemný pocit, neodkladne nás kontaktujte, bude možné, že sa vložka neužíva podľa našich odporúčaní a preto si vaše užívanie prekontrolujeme a znovu s vami preberieme.

Zašleme Vám bezplatný formulár s od tlačkom, v ktorom môžete zaznačiť, kde vás vložka tlačí vo vašej obuvi. Na základe vami poskytnutých informácií prezrieme vašu vložku e.b. fusselastic a zvážime, či je potrebný následný test alebo či existujú iné spôsoby, ako by sa dal problém vyriešiť. Počas prvých troch mesiacov bude táto služba bezplatná, potom sa môže účtovať servisný poplatok.

Môžeme vám ale zaručiť, že nakoniec budete s vašimi vložkami určite spokojní!

Dôležité pravidlá pri kúpe novej obuvi!

1. Nezabudnite si so sebou vziať vložku e.b. fusselastic!
2. Vybranú obuv si najprv vyskúšajte bez vložiek a následne aj s nimi! Topánky si kupujte len vtedy, ak sa v oboch prípadoch pohodlne prispôsobili vašim nohám!
3. Či už si vyberiete pracovnú obuv, turistickú obuv, čižmy alebo topánky s otvorenou špičkou, vždy si vyberte kvalitu z mäkkej prírodnej kože, pretože v nej sa budú vaše nohy cítiť naozaj dobre, a aj vložky budú fungovať v takejto obuvi najlepšie.
4. Dbajte na to, aby žiadne šitia alebo popruhy nestláčali vaše chodidlá, pretože by bránili e.b. fusselastic pracovať a nebudú vedieť ani účinkovať!
5. Päta obuvi by mala tesne obopínať opätok, aby sa noha v topánke nekývala! Ak je obuv a päta príliš veľká, nebude schopná dostatočne udržať nohu! Vždy si vyberajte obuv, ktorej veľkosť je presne prispôsobená veľkosti chodidla: nemôže byť ani príliš malá, ani príliš veľká!
6. Ak môžete, zvolte si obuv s rovnejším opätkom, nakoľko opätok vyšší ako 5 centimetrov viac zaťažuje nohu a v tomto prípade by ani e.b. fusselastic nedokázal správne uplatniť svoj pozitívny účinok.
7. Novú obuv si vyskúšajte až poobede, pretože nohy počas dňa môžu trochu opuchnúť!

Na čo ešte dohliadať pri používaní obuvi?

E.b. fusselastic sa výborne prispôsobujú obuvi, ktorej veľkosť vyhovuje vášmu chodidlu. Ľudia s citlivými chodidlami nosia väčšinou obuv, ktorá je o 1 číslo väčšie ako je ich skutočná veľkosť chodidla. V takýchto prípadoch sa obuv z vyššie uvedených dôvodov (bod. 5) na chodidle pohybuje. Aby sa predišlo takejto situácii odporúčame, aby ste si nechali obuvníkom našíť lepiace vankúšiky na vložku vo vašej obuvi!

Ako upevniť lepiace body v topánke?

(najmä pre otvorenú obuv)

Balenie lepidla pozostáva z ôsmich jednotiek: šesť bielych (na topánku) a dve hrubé, tmavé (na vložku). V prvom kroku najprv očistite vložku vzadu na spodnej strane alkoholovým tampónom! Potom odlepte fóliu z tmavého lepidla a prilepte ho na spodnú časť vložky (päťová časť)! Prilepte biele kolíky na topánku v päťovej časti! **Lepidlo nechajte schnúť 24 hodín!** Vložte si vložku do topánky! Týmto zabránite, aby mohla skĺznuť dopredu. Ak presúvate vložku z jednej topánky do druhej, použite ukazovák a pevne držte podrážku v obuvi (medzi pätníkom a pružnou časťou)! Malé lepiace kolíky by mali všetky ostať či už na podrážke obuvi ale aj na vložke e.b. fusselastlic.

Záruka 5 rokov na vaše vložky!

Vložky sú vyrobené z najkvalitnejšej špeciálnej švédskej ocele. Zaručujeme ich trvanlivosť, pretože vieme, že dobrá tvrdená oceľ môže vydržať viac ako 10 rokov.

V prípade, ak by ste obdržali poškodenú vložku aj napriek starostlivému zabaleniu, pošleme vám namiesto nej novú. V takomto prípade sa bude na novú vložku vzťahovať nová záručná doba. Na poškodené vložky, spôsobené ich nesprávnym používaním, sa záruka nevzťahuje a nebude sa dať uplatniť!

Osobná identifikácia zákazníka

Dbajte na to, aby bolo ID zákazníka (uvedené na obale) starostlivo uchované pre prípady dodatočnej objednávky, žiadosti o informácie, alebo aj v prípade záručnej reklamácie, atď.

Kontakt

V prípade nejasností nás zastihnete na:

Email: info@fusselastlic.sk

Tel.čísle: +421 947 933 555